

EEN PROFESSIONELE PRIKKER MET VERSCHILLENDE PRIKDIEPTES



CNK:
2406-247
Referentie:
3603539150

COMFORT

- Drie instelbare prikdieptes (1,3 mm - 1,8 mm - 2,3 mm)
- Drievlaks geslepen naaldpunt voor een nagenoeg pijnloze prik (diameter 0,63 mm, 23 G)


HYGIËNE EN VEILIGHEID

- Éénmalig gebruik voorkomt kruisbesmetting
- Uniek prikmechanisme vermindert de kans op onvrijwillig prikken


GEBRUIKSGEMAK

- T-vormig ontwerp maakt hanteren eenvoudig en gemakkelijk om aan te leren
- Geschikt voor verschillende types personen (ook voor kinderen jonger dan 1 jaar en neonaten)

HOE TE GEBRUIKEN?

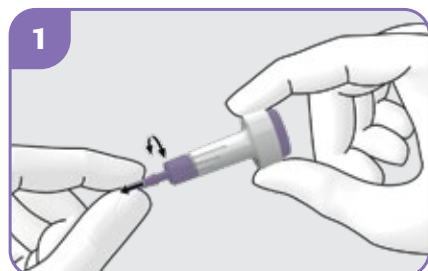

1. Verwijder het steriel beschermkapje met een draaibeweging.

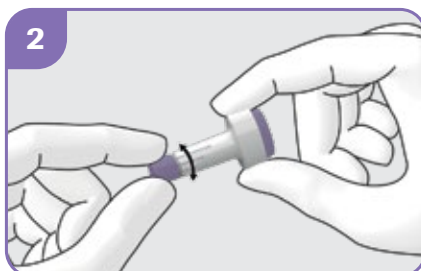

2. Stel de gewenste prikdiepte in door de paarse instelring boven de gekozen diepte (uitsnijding) te draaien.



3. Klem de prikker tussen wijsvinger, middelvinger en duim. Druk de prikker stevig tegen het huidoppervlak aan. Druk de paarse prikknop volledig in.



EEN EENVOUDIGE PROFESSIONELE PRIKKER KLAAR VOOR GEBRUIK



CNK:
2595-874
Referentie:
5888662150

COMFORT

- Klaar voor gebruik, met vooraf ingestelde diepte-instelling van 1,5 mm
- Drievlaks geslepen naaldpunt voor een nagenoeg pijnloze prik (diameter 0,36 mm, 28 G)


HYGIËNE EN VEILIGHEID

- Éénmalig gebruik voorkomt kruisbesmetting
- Uniek prikmechanisme vermindert de kans op onvrijwillig prikken


GEBRUIKSGEMAK

- T-vormig ontwerp maakt hanteren eenvoudig en gemakkelijk om aan te leren
- Geschikt voor verschillende types personen (ook voor kinderen jonger dan 1 jaar en neonaten)

HOE TE GEBRUIKEN?

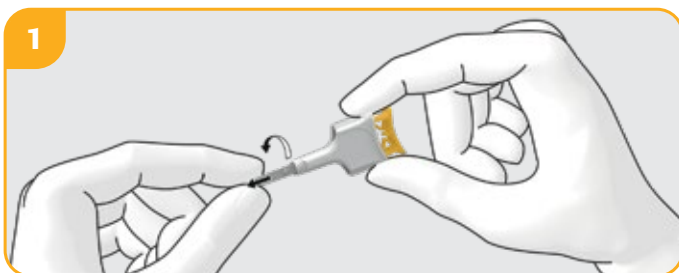

1. Verwijder het steriel beschermkapje met een draaibeweging.

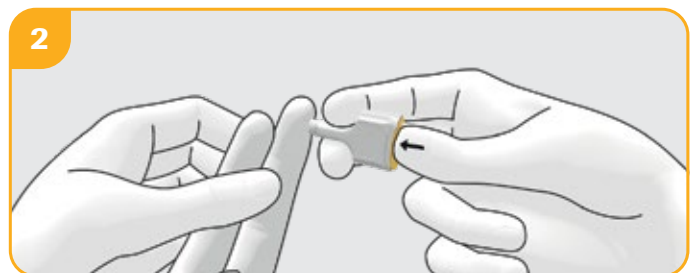

2. Klem de prikker tussen wijsvinger, middelvinger en duim. Druk de prikker stevig tegen het huidoppervlak aan. Druk de gele prikknop volledig in.